

困ったときは
 米原市消費生活相談窓口へ
 (米原庁舎1階)
 相談専用 ☎52-8088
 受付 平日 9時30分~16時

介護用ベッドで事故が発生しています!

8月に東京都の介護施設で、80代の入居者が、介護ベッド用の手すり(サイドレール)とヘッドボード(頭部のつい立て)のすき間に首を挟まれた状態で発見され、死亡が確認されたという事故が発生しました。

以前から似たような事故が相次いで発生していて、消費者庁には平成24年度で3件の死亡事故が、過去5年間では31件、重傷事故を含めれば62件が報告されています。

事故防止のため、介護に携わっている在宅介護のご家庭や、病院・高齢者施設のみなさんは、「介護ベッドの手すりに危険性がある」ということを認識してください。



詳しくは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参考にしてください。
<http://www.bed-anzen.org/>

事故防止のチェックと対応方法

①ボードとサイドレール等の間に首を挟み込みそうなすき間はありませんか?

- ベッド周りを整理整頓し、利用者が身を乗り出さないように配慮しましょう。
- ボードとサイドレール等のすき間をクッションや毛布等を入れて埋めましょう。



②サイドレールとサイドレール等の間に首を挟み込みそうなすき間はありませんか?

- 利用者から目を離す際は、ベッドの背中を必ずフラットに戻しましょう。
- すき間を埋める対応品を利用しましょう。



③サイドレール等に頭を挟み込みそうな空間はありませんか?

- カバーで覆われたサイドレール等や後付けカバーを必要に応じて利用しましょう。
- すき間が小さく、より安全なサイドレール等に交換しましょう。



④利用者の状態を確認しながら、ベッドの操作を行っていますか?

- ベッドを操作する前と操作中に、動作を止めて利用者の状態を確認しましょう。介護する方が立っている場所と反対側は、布団などで死角となるため、特に注意しましょう。



人のうごき	人口40,666人 (-8)	男19,949人 (+6)	女20,717人 (-14)	世帯数13,749世帯 (+14)
	65歳以上の人口 10,339人	高齢化率 25.42%	※カッコ内は前月との比較【平成24年12月1日現在】	

〒521-8501
 滋賀県米原市下多良三丁目3番地
 ☎0749(52)6627
 ☎0749(52)5195

発行日 平成24年12月13日(木)
 Eメール koho@city.maibara.lg.jp
 公式サイト http://www.city.maibara.lg.jp/